



I AM
ACCURATE

GINGIPROTECT



**Preservación óptima
del margen gingival**

ACTEON
Prodent Halliger

GINGIPROTECT



“ La protección eficaz de la encía marginal es un imperativo importante en las restauraciones estéticas. Una vez probado, el retractor gingival GingiProtect® llega a ser tan esencial como la sonda periodontal. **Dr Jean-François LASSERRE** (Burdeos, Francia) ”

RESTAURACIONES ESTÉTICAS: GINGIPROTECT® ES UN VALIOSO INSTRUMENTO PARA PROTEGER EL MARGEN GINGIVAL



La punta curvada está dedicada a los límites vestibulares.



La punta plana está dedicada a los límites proximales.



L 3,2mm REF. 261GPR2 L 3,2mm

REF. 261GPR2

L 3,7mm REF. 261GPR3 L 3,7mm

REF. 261GPR3

L 4,3mm REF. 261GPR4 L 4,3mm

REF. 261GPR4

Manténgase seguro durante el acceso subgingival:

- ▶ Control de la preparación de los límites marginales o cervicales intrasulculares.
- ▶ Acceso sin esfuerzo al cemento de restauraciones cerámicas para pulir finamente el hueco adhesivo.
- ▶ Mantenga el hilo de retracción gingival alejado de la fresa rotatoria.
- ▶ Identificar una fractura o fisura de raíz.
- ▶ Retire el cemento adhesivo residual en los límites protésicos.
- ▶ Empuje hacia abajo el dique de goma al insertar y cementar la prótesis.
- ▶ Fácil colocación del composite en caries de clase V: no se produce sangrado al preparar, cementar y pulir.



Para inmejorables procedimientos de restauración,
Gingiprotect® combina perfectamente con:

EXPASYL™



Apertura del surco efectiva y
atraumática para prótesis
naturales y estéticas.

perfectmargin
Rounded



Perfección al límite:
acabado protésico con forma
redondeada o de hombro.



Mire el video clínico en



www.acteongroup.com/es

Producto sanitario de clase I - CE - Solo para uso profesional dental.
Este producto sanitario está fabricado de acuerdo con las regulaciones actuales y estándares, y de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485 certificado.
Fabricante: PRODONT-HOLLIGER (Francia).

PRODONT-HOLLIGER | A Company of ACTEON Group
La Marnasse | 63880 OLLIERGUES | FRANCE
Tel + 33 (0) 473 955 642 | Fax + 33 (0) 473 955 699
E-mail : info@prodont-holliger.fr | www.acteongroup.com/es

